



1598

ALLERGAN



CELLUMED™

**Sofortige und lang anhaltende Erleichterung bei Trockenheit und Müdigkeit der Augen.**

CELLUMED™ verschafft wohltuende und schnelle Linderung beim Gefühl von Trockenheit in den Augen und bei Reizungen, die durch Staub, intensives Licht, Pollen, Luftverschmutzung, Überanstrengung und Überarbeitung der Augen verursacht werden.

CELLUMED™ lindert schnell und anhaltend unangenehme Reizerscheinungen bei allen Kontaktlinsenträgern.

**Anwendung:**

- 1 bis 2 Tropfen der Lösung in das betroffene Auge geben.
- Anwendung nach Bedarf wiederholen.
- Sie können auch während des Tragens von Kontaktlinsen nachbenetzen, ohne diese von den Augen zu nehmen.

**Geeignet für alle Arten von Kontaktlinsen.****Vorsichtshinweise:**

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn die Versiegelung des Deckels vor dem ersten Öffnen beschädigt ist.
- Lösung nicht einnehmen.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropferspitze nicht berühren; vermeiden Sie auch den direkten Kontakt mit dem Auge.
- Flasche nach Gebrauch fest verschließen.
- Lösungsreste 60 Tage nach dem Öffnen verwerfen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Bei der Verwendung zusammen mit anderen Augentropfen sollten diese im Abstand von mindestens 10 Minuten eingeträufelt werden.

Wenn die Reizerscheinungen anhalten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Augenarzt.

**Enthält:**

Natriumcarboxymethylcellulose 1,0 %  
PURITE® 0,0075 %

CE 0050

STERILE A

ALLERGAN

Hersteller:  
Allergan Pharmaceuticals Ireland  
Castlebar Road, Westport, Co. Mayo, Irland

Lokaler Ansprechpartner:  
Pharm-Allergan GmbH  
Pforzheimer Straße 160, D-76275 Ettlingen

71566EW12S

